

MASCARILLA DESECHABLE DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

+ CUMPLE UNE-EN 149:2001+A1:2009

+ REGLAMENTACIÓN EU 2016/425.



Colores disponibles:



Mascarilla
Categoría III



EPI
Equipo de protección individual



BFE>95%
Eficiencia de filtración bacteriana



PFE>95%
Eficiencia de filtración de partículas

**+ Supermercados
y comercios**

+ Oficinas

+ Recepciones

**+ Centralitas
telefónicas**

**+ Contacto directo
con otras personas**

**+ Personal
de cocina**

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en las orejas.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020